



## TEST RÁPIDO INFLUENZA PARA PERROS


### ¿QUÉ ES?

El lab4pets CIV Ag se basa en un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral, para la detección cualitativa del antígeno del virus de la influenza canina (CIV Ag).

- **Muestras:** secreciones oculares, nasales o anales en perros.
- **Duración del test:** 5-10 minutos.

### MODO DE EMPLEO

1. Recoja las secreciones oculares, nasales o anales de su perro con el hisopo de algodón e imprégnelo bien.
2. Inserte el hisopo en el tubo con el diluyente proporcionado en el kit. Agítelo para obtener una extracción eficiente de la muestra.
3. Saque el casete del test de la bolsa de aluminio y colóquelo horizontalmente.
4. aspire la extracción de muestra del tubo de solución diluyente y coloque 3 gotas en el pocillo del casete "S" destinado para la muestra.
5. Interprete el resultado en 5-10 minutos. El resultado después de 10 minutos se considera inválido.

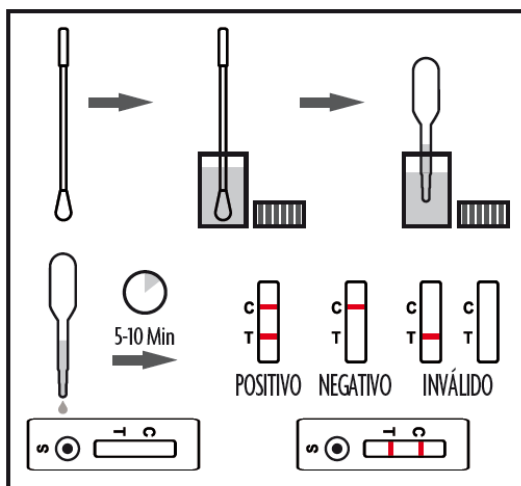

### INTERPRETACIÓN RESULTADOS

**POSITIVO(+):** presencia de 2 líneas coloreadas, la del control C y la del test T. La intensidad del color de la banda no es importante para interpretar el resultado.

**NEGATIVO(-):** Solo aparece la línea del control C. No debería aparecer la línea T.

**INVÁLIDO:** No aparece la línea del control C (la que marca que el test está bien hecho).