



## TEST RÁPIDO PANLEUCOPENIA, CORONAVIRUS Y GIARDIA PARA GATOS


### ¿QUÉ ES?

El lab4pets Panleukopenia/Corona/Giardia Antigen Combo Rapid Test es una prueba rápida para diagnosticar la presencia de anticuerpos contra la Panleucopenia, Corona y Giardia

- **Muestras:** heces o vómitos en gatos.
- **Duración del test:** 5-10 minutos.

### MODO DE EMPLEO

1. Recoja una muestra fresca de las heces o el vómito de su gato con el hisopo de algodón.
2. Inserte el hisopo en el tubo con el diluyente proporcionado en el kit. Agítelo para obtener una extracción eficiente de la muestra.
3. Saque el casete del test de la bolsa de aluminio y colóquelo horizontalmente.
4. aspire la extracción de muestra del tubo de solución diluyente y coloque 3 gotas en el pocillo del casete "S" destinado para la muestra.
5. Interprete el resultado en 5-10 minutos. El resultado después de 10 minutos se considera inválido.

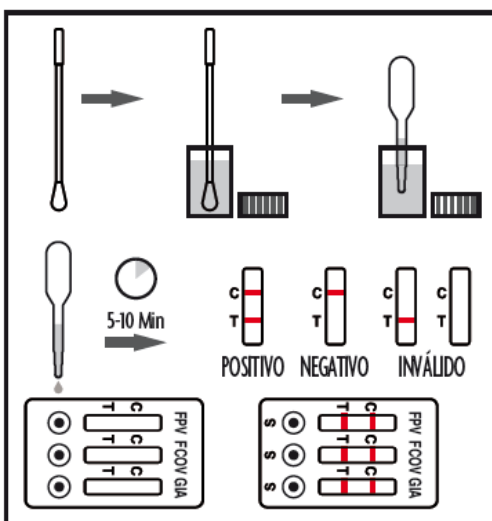

### INTERPRETACIÓN RESULTADOS

**POSITIVO(+):** presencia de 2 líneas coloreadas, la del control C y la del test T. La intensidad del color de la banda no es importante para interpretar el resultado.

**NEGATIVO(-):** Solo aparece la línea del control C. No debería aparecer la línea T.

**INVÁLIDO:** No aparece la línea del control C (la que marca que el test está bien hecho).